


**POLYP TRAP**  
Tissue Collection Device  
(ENGLISH & FRENCH IFU)

**DIRECTIONS FOR USE**

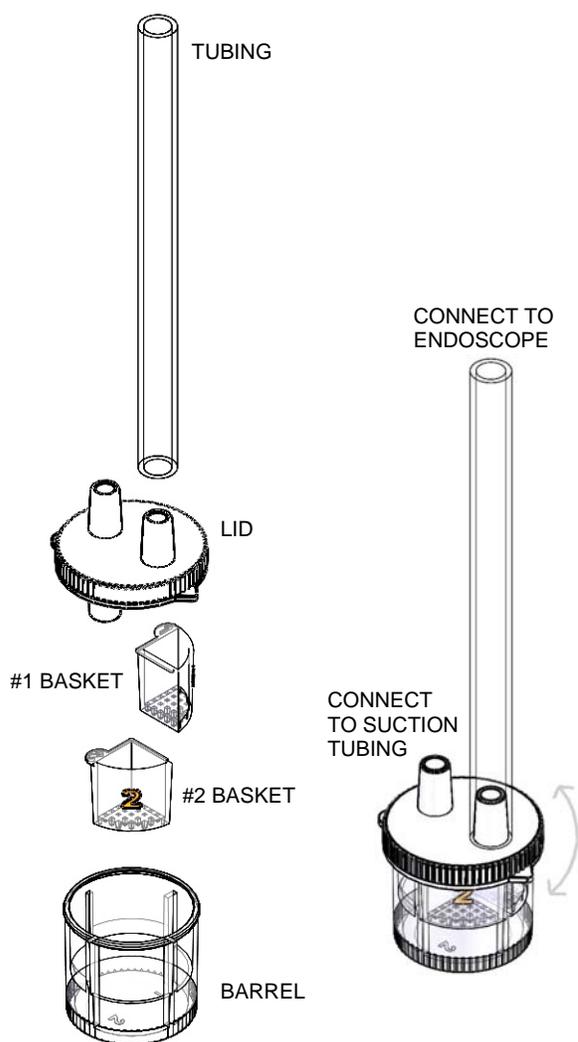

1. CONNECT TUBING ON THE TRAP TO THE ENDOSCOPE AND CONNECT THE SUCTION TUBING TO THE TOP OF THE TRAP. MAKE SURE THE TUBING FROM THE SCOPE IS OVER THE #1 BASKET.
2. AFTER THE FIRST TISSUE SPECIMEN IS RETRIEVED, LIFT THE LID OF THE TRAP AND ALIGN THE TUBING FROM SCOPE OVER THE #2 BASKET FOR RETRIEVAL OF THE SECOND SPECIMEN.
3. AFTER THE SECOND SPECIMEN HAS BEEN RETRIEVED, REMOVE THE TRAP FROM THE ENDOSCOPE.
4. REMOVE THE LID FROM THE TRAP, THEN REMOVE THE NUMBERED BASKETS AND PLACE THE ENTIRE BASKET WITH THE SPECIMEN INTO THE APPROPRIATE CONTAINER.
5. DISCARD THE REMAINING PORTION OF THE TRAP.

- ❖ NON-STERILE-SINGLE USE ONLY
- ❖ RE-ORDER NUMBER: PLT-001



**PRIMED INSTRUMENTS INC.**

1080 Tristar Drive, Unit 14  
Mississauga, Ontario L5T 1P1, Canada

Toll Free Phone: 1 877 565 0565

Toll Free Fax: 1 877 565 0566


[www.primedstruments.com](http://www.primedstruments.com)

**MADE IN CANADA**

## COLLECTEUR DE POLYPES

Dispositif pour prélever des échantillons tissulaires  
(ENGLISH & FRENCH IFU)

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

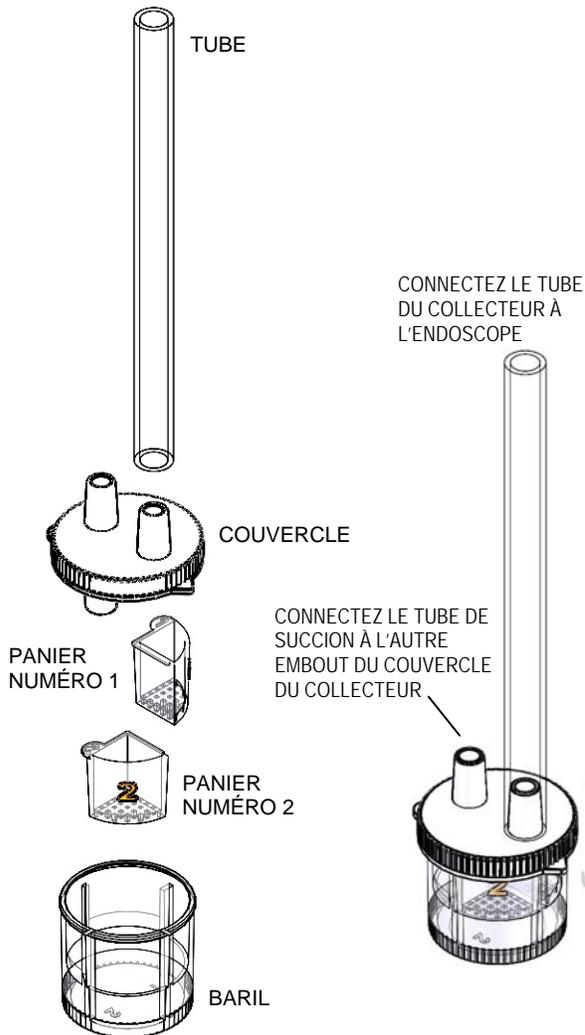

1. Connectez le tube du collecteur à l'endoscope. Connectez le tube de succion à l'autre embout du couvercle du collecteur. Assurez-vous que le tube provenant de l'endoscope soit bien au-dessus du panier numéro 1.
2. Une fois que le premier spécimen est récupéré, levez le couvercle du collecteur et alignez l'entrée provenant de l'endoscope au-dessus du panier numéro 2 afin de récupérer le deuxième spécimen.
3. Après que le deuxième spécimen est récupéré, détachez le collecteur de l'endoscope.
4. Enlevez le couvercle du collecteur et retirez les paniers numérotés et placez le panier en entier avec le prélèvement dans un contenant approprié.
5. Jetez la partie subsistante du collecteur.

- ❖ **UTILISATION USAGE UNIQUE SEULEMENT  
NON STÉRILE**
- ❖ **NUMÉRO DE COMMANDE: PLT-001**



**PRIMED INSTRUMENTS INC.**

1080 Tristar Drive, Unit 14  
Mississauga, Ontario L5T 1P1, Canada

Toll Free Phone: 1 877 565 0565

Toll Free Fax: 1 877 565 0566

[www.primedstruments.com](http://www.primedstruments.com)

**FABRIQUÉ AU CANADA**